


Einziehanleitung Ohrmarken

Zum Einziehen der Ohrmarken verwenden Sie unsere **Hauptner und Herberholz** Ohrmarkenzange. Beim Einziehen der Marken sind folgende Punkte zu beachten:

- 1) Stecken Sie das Dornenteil bis zum Anschlag auf den Dorn der Ohrmarkenzange.
- 2) Schieben Sie die Lochplatte unter das Federteil der Ohrmarkenzange.
- 3) Führen Sie die Zange an das Ohr. Die Position sollte so gewählt sein, dass die Marke in der Mitte des Ohrs zwischen den Knorpelsträngen, - Dornenteil am Außenohr / Lochteil am Innenohr - positioniert ist.
Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie ein Schwein, ein Schaf oder eine Ziege kennzeichnen.

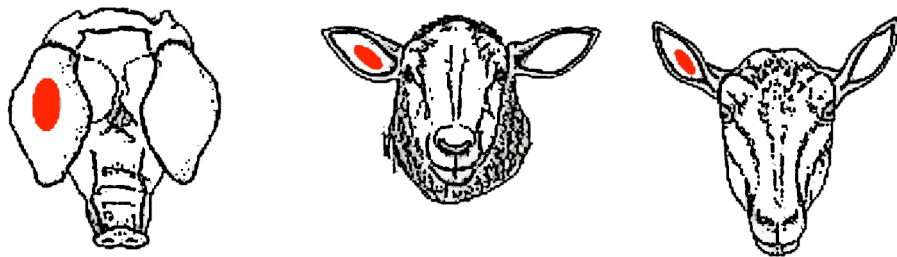

- 4) Achten Sie darauf, dass keine größeren Blutgefäße verletzt werden.
- 5) Kneifen Sie schnell mit Druck die Marke ein. Die Marke ist ordnungsgemäß eingezogen, wenn Sie einen „Klick“ spüren.
- 6) Öffnen Sie sofort ohne Verzögerung die Zange! So vermeiden Sie, dass das Ohr verletzt wird.
- 7) Empfehlenswert ist eine antiseptische Behandlung, die die Wundheilung beschleunigt und Ohrentzündungen verhindert. Überwachen Sie den Heilungsprozess und behandeln Sie die Wunde falls notwendig.

