





## ALLFLEX OHRMARKEN FÜR SCHAFE UND ZIEGEN

So werden sie korrekt eingezogen


❶ Drücken Sie die Klammer der Zange und schieben Sie das Lochteil in die Zange.

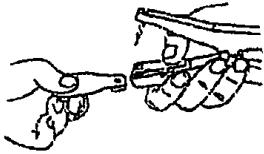

❷ Schieben Sie das Dornenteil auf den Dorn der Zange.

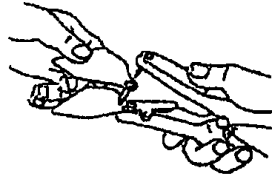

❸ Sehr wichtig!  
Lochteil innen  
am Ohr, Dornenteil außen  
am Ohr einziehen.  
Einmal die Zange fest  
und voll zudrücken.

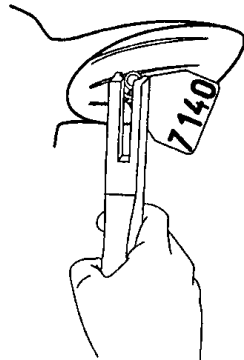

Das Ohr des Tieres zeigt drei Venen.  
Positionieren Sie das Lochteil der Ohrmarke zwischen den unteren beiden Venen im ersten Drittel zur Kopfseite.

❹ Nach dem Einziehen Lochteil  
und Dornenteil der Ohrmarke am  
Ohr gegeneinander drehen.



### Vorsichtsmaßnahmen beim Einziehen der Ohrmarke

- 1 - Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Zange (Allflex Total Tagger) mit dem richtigen Dorn benutzen.
- 2 - Prüfen Sie, dass die Ohrmarke nach dem Einsetzen frei drehbar ist. Das Ohr darf keine Druckstellen bekommen.
- 3 - Verfolgen Sie die Wundheilung in den nächsten 14 Tagen genau und desinfizieren Sie die Wunde falls nötig.
- 4 - Kennzeichnen Sie das Tier nicht unmittelbar nach der Geburt, warten Sie mindestens so lange bis es trocken ist.
- 5 - Bitte lagern Sie die Ohrmarken in der Originalverpackung.

ALLFLEX EUROPE SAS - Bergstrasse 11 - 20095 HAMBURG  
TEL. : (0) 40-2795467 - FAX : (0) 40-27806110

IMP. DENIS RENNES