


## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR TWINTAG-Ohrmarkenzange

1. Beim Einsetzen der Ohrmarken in die Zange beachte man, dass sie fest hinter den Federn in den Zangebacken sitzen. Dabei muss das Unterteil (mit Loch) in die Zangebacke mit dem großen Loch eingesetzt werden. Das Oberteil (mit Dorn) kommt in die gegenüberliegende Seite. Bitte beachten Sie, dass die Stütze des Dorns genau auf das Loch des Unterteiles gerichtet ist.
2. Das Ohr des Tieres muss nahe dem zum Einsatz der Ohrmarke bestimmten Platz festgehalten werden. Dann wird die Spitze des Dornes dicht neben den Daumen gesetzt und die Zange mit schnellen festen Druck ganz geschlossen. Danach die Zange wieder aufschnappen lassen und vorsichtig vom Ohr entfernen.
3. Die Ohrmarke wird von der Außenseite des Ohres so angebracht, dass nach der Verbindung beider Ohrmarkenteile die Dornspitze im Innern des Ohres liegt.
4. Wir empfehlen, die Ohrmarken vor dem Einziehen bei Zimmertemperatur aufzubewahren.
5. Für eine 100% ige erfolgreiche Markierung der Tiere ist es wichtig, die Ohrmarke an der richtigen Stelle des Ohres anzubringen. Nutzen Sie dafür am besten die in den Skizzen angezeigten Stellen und achten Sie auf die Knorpelleisten.

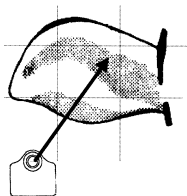

Schafe

6. Die Mittelachse der Zange sowie auf beiden Seiten zwischen den Hebeln gelegentlich mit leichtem Maschinenöl einölen.