

Caisley


So platzieren Sie die Ohrmarken richtig !

1. Bringen Sie die Ohrmarke zwischen den beiden Knorpelleisten auf **1/3 bis 1/2 Ohrlänge** vom Ohrgrund entfernt mit dem **Lochteil am Innenohr** und dem **Dornteil am Außenohr** durch **einmaliges kräftiges** Schließen der Zange an.

WICHTIG !!!



2. Danach öffnen Sie sofort die Zange vollständig durch Öffnen der Hand und ziehen dann die Zange von der nun im Ohr geschlossenen Ohrmarke ab!

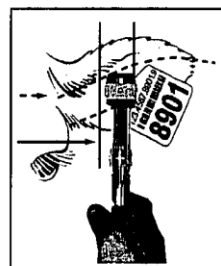

3. Achten Sie beim Einziehen der Ohrmarken auf die Einhaltung der üblichen antiseptischen Vorsorgemaßnahmen. Prüfen Sie die Wundheilung und desinfizieren Sie die Wunde falls nötig.

Diese Positionen sind falsch:

