

Anleitung zur Applikation von Boli bei Schafen und Ziegen

1	<p style="text-align: center;">Wichtig</p> <p>Um Verletzungen am Tier zu vermeiden, muss der Bolus von einer sachkundigen Person gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass der Pansen vollständig ausgebildet sein muss. (min. 15 kg Lebendgewicht des Tieres)</p>	
2	<p style="text-align: center;">Hinweise</p> <ol style="list-style-type: none"> Lesen Sie vor dem Setzen den Bolus mit einem Lesegerät aus, um Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Die Nummer sollte immer mit der visuellen Ohrmarke abgeglichen werden, um Verwechslungen zu vermeiden. Überprüfen Sie, ob beim Tier bereits ein Transponder vorhanden ist. 	
3	<p style="text-align: center;">Applikation</p> <ol style="list-style-type: none"> Das Tier muss still sitzen, es darf insbesondere keine Vorwärtsbewegungen machen. Achten Sie auf eine gerade Position des Kopfes. Legen Sie den Bolus in den Applikator. Führen Sie den Bolus so ein, dass er auf der Zungenbasis aufliegt. Lösen Sie den Bolus, ziehen Sie den Bolusgeber vorsichtig heraus. Halten Sie das Maul des Tieres geschlossen und kontrollieren Sie, ob das Tier den Bolus schluckt. 	

